

Biotrue 300 ml Kullanım Talimatları

Çok Amaçlı Solüsyon

Nasıl Kullanılır?

Doğru dezenfeksiyon için aşağıdaki tüm adımlar sırayla uygulanmalıdır:

- Ellerinizi sabun ile yıkayın. (**Dikkat** – bazı sıvı sabunlar yağ bazlı süspansiyon maddeleri içerir.)
- En az 3 damla Biotrue® çok amaçlı solüsyon damlatarak lensin her iki tarafını da 20 saniye süreyle hafifçe ovalayınız.
- Biotrue® çok amaçlı solüsyonla lensin her iki tarafını da 5 saniye süreyle iyice durulayınız.
- Temizlenmiş kontakt lensleri lens kabına yerleştirip kabı Biotrue® çok amaçlı solüsyonla doldurunuz. Lenslerin en az 4 saat solüsyonun içinde kalmasını sağlayınız. Daima taze solüsyon kullanmayı unutmayınız.
- Her kullanımdan sonra lens kabınızdaki solüsyonu dökünüz, içini su ile iyice temizleyiniz, ters çevirip kurumaya bırakınız.
- Daima uygun bir temizlik/dezenfekte etme planı ile lens kullanma takvimine uyunuz ve düzenli olarak göz doktorunuza görününüz. Lens bakımı ile ilgili sorularınız varsa göz doktorunuza mutlaka danışınız.

Kullanım Talimatları:

Çok Amaçlı Solüsyon

Biotrue Çok Amaçlı Kontakt Lens Solüsyonu¹, silikon hidrojeller dahil tüm yumuşak kontakt lenslerinizin dezenfeksiyonu ve bakımı için kullanılabilir.

- Sağlıklı gözyaşıyla aynı pH değerine sahiptir ve gözyaşında bulunan bir kayganlaştırıcıyı içerir.
- Mikropların %99,9'unu yok eder.